

# POVIŠENO TOALETNO SJEDALO SA SUSTAVOM ZA ZAKLJUČAVANJE



## PREDVIĐENA UPOTREBA:

Proizvodi linije *povišenog toaletnog sjedala KING (Raised Toilet Seat – RTS)* dizajnirani su za povećanje visine toaletne školjke, kako bi se olakšali postupci sjedenja i ustajanja te pospješila neovisnost i udobnost. Verzije s poklopcem osiguravaju bolje higijenske uvjete tijekom ispiranja toaleta. Poklopac se može upotrebljavati kao sjedalo dok je u zatvorenom položaju.

## INDIKACIJE I KONTRAINDIKACIJE:

Povišeno toaletno sjedalo KING namijenjeno je starijim osobama, korisnicima invalidskih kolica, osobama sa smanjenom pokretljivošću lumbalnog dijela, koljena ili kuka te svima onima koji bi mogli imati poteškoća pri sjedenju na toaletnu školjku i ustajanju s nje. Tijekom upotrebe potrebna je sposobnost samostalnog sjedenja. Ne preporučuje se upotreba RTS-a u slučaju poremećaja percepcije ili problema s ravnotežom tijekom sjedenja.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA I INDIKACIJE:

- Ne smije se prekoračiti najveća težina korisnika navedena u uputama za postavljanje.
- Prije svake upotrebe provjerite je li RTS u stabilnom položaju na toaletu i pravilno pričvršćen na njega posebnim dodacima za pričvršćivanje koji su isporučeni.
- Nemojte previše zategnuti sustav za zaključavanje.
- Tijekom sastavljanja strogo se pridržavajte onoga što je prikazano u Korisničkom priručniku.
- Nemojte mijenjati RTS i njegove komponente ni na koji način.
- Nemojte upotrebljavati RTS ako je oštećen ili izmijenjen bilo na koji način. Pukotine i deformacije mogu snažno utjecati na učinkovitost i sigurnost uređaja.
- Budite sigurni da je visina RTS-a takva da je njegova upotreba jednostavna i sigurna za korisnika.
- Tijekom upotrebe izbjegavajte položaje koji drže tjelesnu težinu previše prema naprijed. Pogrešni položaji mogu dovesti do nestabilnosti i prevrtanja RTS-a.
- RTS se ne smije čuvati na otvorenom.

## INFORMACIJE O ODRŽAVANJU:

Održavanje proizvoda sastoji se od postupaka čišćenja i dezinfekcije. Kako bi se zajamčila sigurna upotreba i odgovarajući higijenski standard, korisnik bi trebao obaviti ove postupke prije svake upotrebe.

Korisnik se mora uvjeriti u strukturalnu cjelovitost uređaja i njegovih komponenti. Za postupke čišćenja i dezinfekcije slijedite korake u nastavku:

1. Potrebno je nositi rukavice.
2. Uklonite očitu prljavštinu prije nego što nastavite s najpouzljivijom dezinfekcijom.
3. Za postupak čišćenja upotrijebite vodu ili neagresivni deterdžent.
4. Obrisite suhom i čistom krpom.

**Umjesto toga, RTS se može čistiti u kućanskim perilicama posuda na maksimalnoj temperaturi.**

## ZAHTEJEVI ZA PONOVNUPOTREBU:


Proizvod je prikladan za ponovnu upotrebu od strane drugih korisnika. Prije ponovne upotrebe od strane drugih, proizvod mora biti pravilno očišćen i dezinficiran. Prije davanja proizvoda drugima, proizvod moraju provjeriti kvalificirani trgovci.

## PRAVILAN POSTUPAK ODLAGANJA:

Ne odlazite proizvod u uobičajeni kućni otpad. Unaprijed pitajte lokalne vlasti za pravilan i ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja.


## PRIJAVLJIVANJE NEZGODE:

Ako je došlo do ozbiljne nezgode s ovim uređajem, obratite se proizvođaču uređaja na [info@lmglobaldesign.com](mailto:info@lmglobaldesign.com) i nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

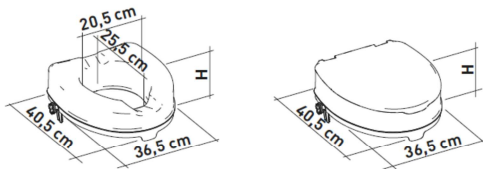

KOD ARTIKLA	H	POKLOPAC
KING-5-00	5 cm / 2"	<input type="checkbox"/>
KING-10-00	10 cm / 4"	<input type="checkbox"/>
KING-15-00	15 cm / 6"	<input type="checkbox"/>
KING-5L-00	5 cm / 2"	<input checked="" type="checkbox"/>
KING-10L-00	10 cm / 4"	<input checked="" type="checkbox"/>
KING-15L-00	15 cm / 6"	<input checked="" type="checkbox"/>

# POVIŠENO TOALETNO SJEDALO SA SUSTAVOM ZA ZAKLJUČAVANJE

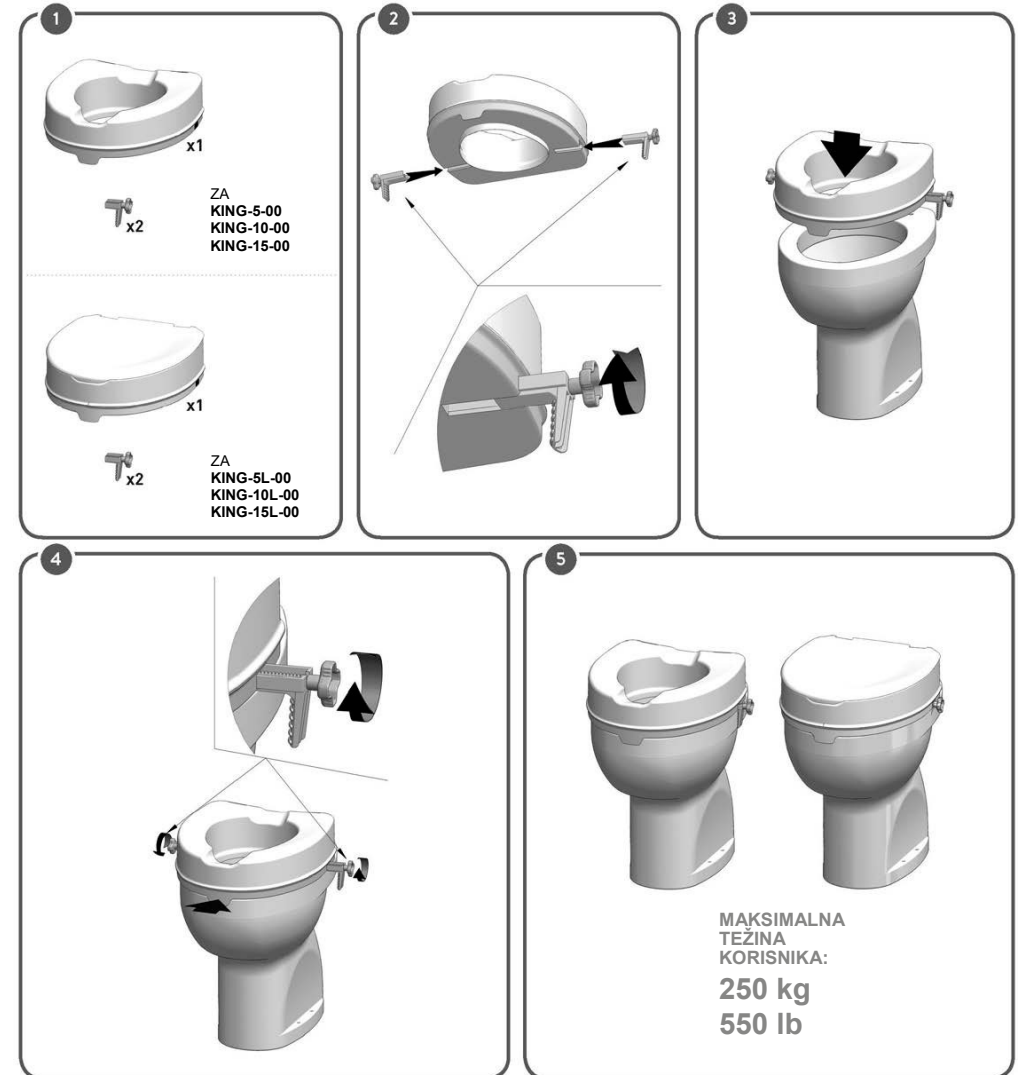

PROIZVEDENO  
U ITALIJI

